

监护仪日常维护

- 1、仪器安放位置应避免阳光照射，以免造成机器内异常的温度升高。
- 2、仪器应放在固定的位置，防止震动，表示明显，不得随意挪动，定人保管。
- 3、使用完毕，对机身导线、配件进行清洁消毒。
- 4、定时检查仪器是否可正确使用，发现问题及时解决。
- 5、各插件，导联齐全，位置固定，处于备用状态。
- 6、机内的各种可调元件不应擅自调节，以免造成不应有的故障影响使用
- 7、仪器如长期不用，应放于干燥处，盖好防尘罩
- 8、监护仪屏幕每周有 95%酒精擦拭 1 次
- 9、及时登记使用，检查，送修情况

“质量第一

诚信服务

合法经营”

您的满意是我们的追求！