


监护仪基本操作

1、检查各个插口有无松动，接通电源，打开监护仪开关，检查仪器性能，选导联、选监护模式，检查仪器工作是否正常。

监护仪操作界面

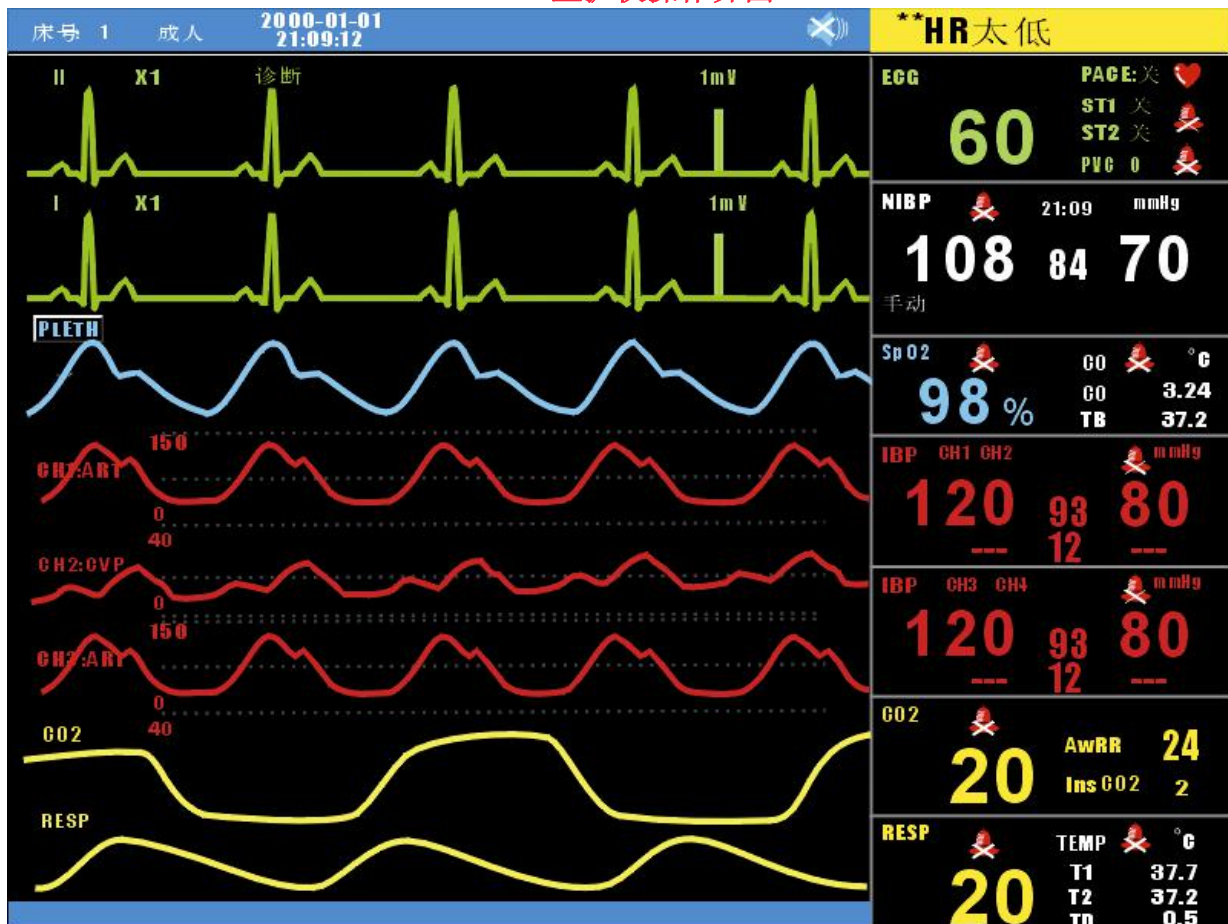

2、皮肤准备（70%酒精擦拭皮肤）

3、连接电极，粘贴电极片，正确固定。

标准五导联：


RA——右锁骨中线下缘靠近右肩

LA——左锁骨中线下缘靠近左肩

RL——右季肋部

LL——左季肋部

VV——胸壁上

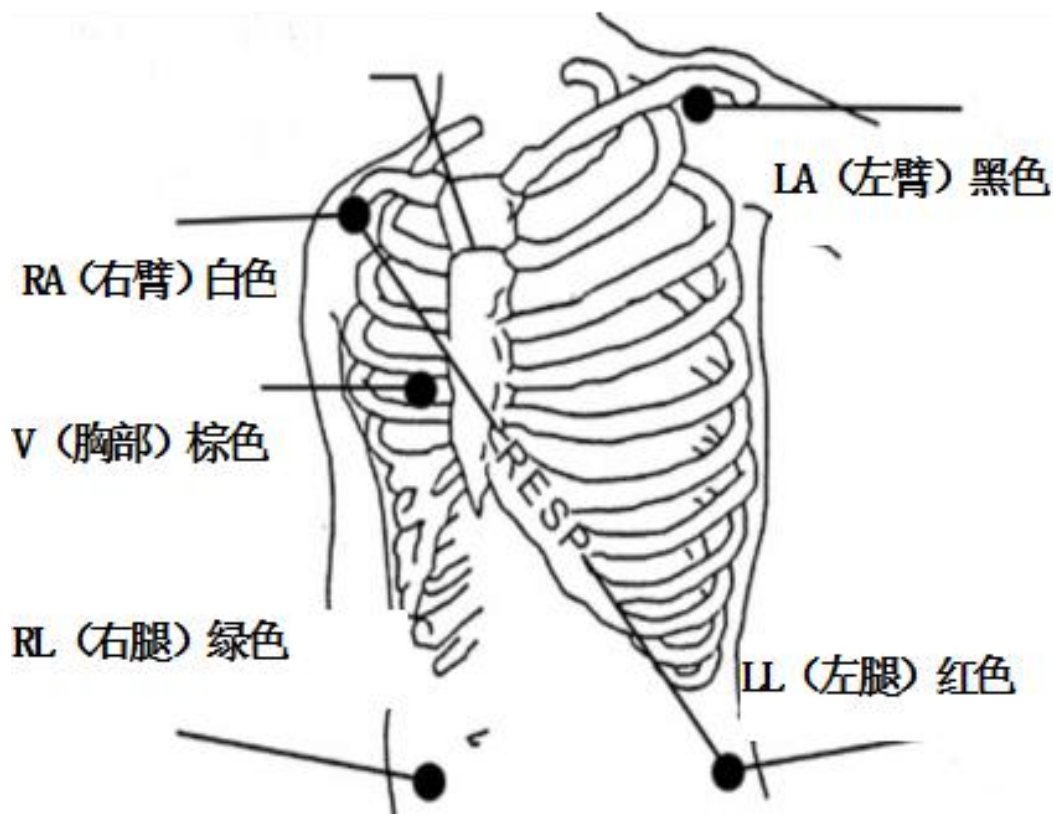


美国		欧洲	
导联名称	颜色	导联名称	颜色
RA	白色	R	红色
LA	黑色	L	黄色
LL	红色	F	绿色
RL	绿色	N	黑色
V	棕色	C	白色

标准三导联

R (右臂) 电极——锁骨下，靠近右肩

L（左臂）电极——锁骨下，靠近左肩

F（左腿）电极——左下腹

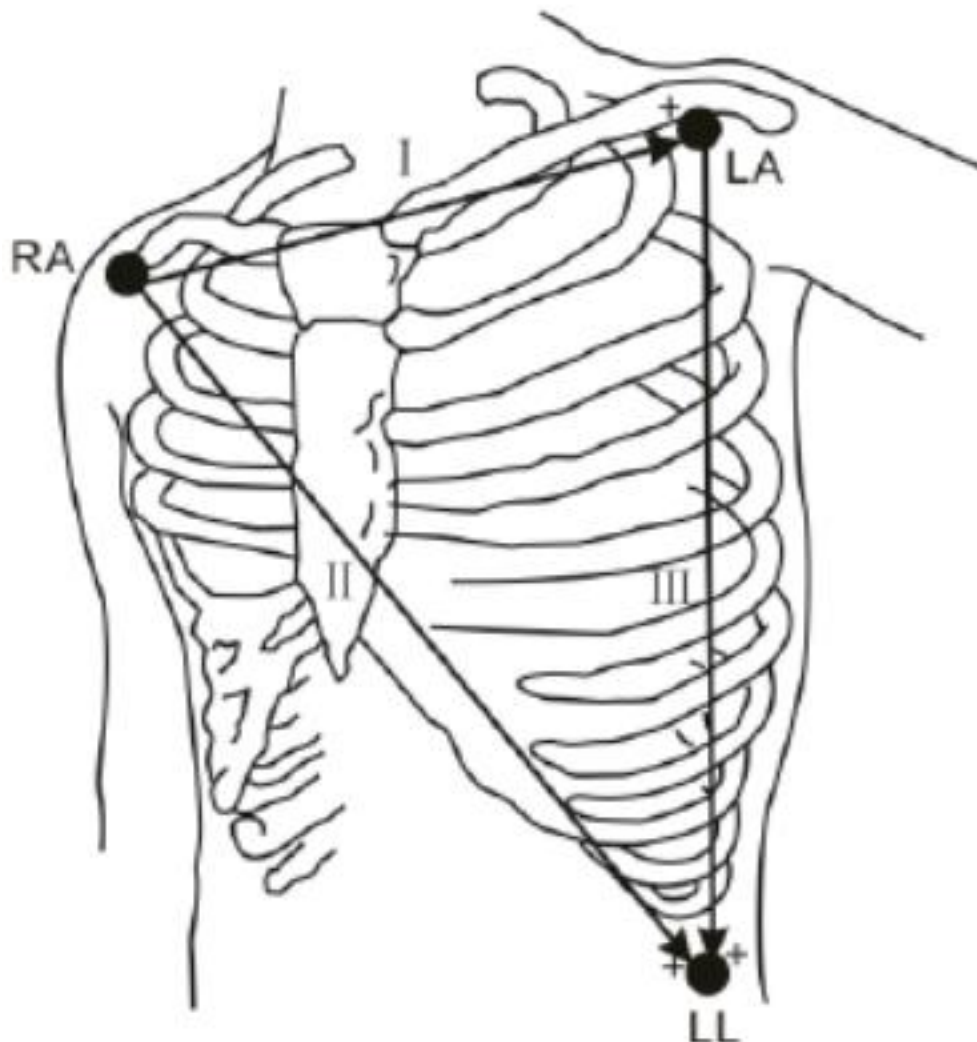

4、连接血压袖带

选择合适的袖套

不要在有静脉输液或插管的肢体上安装袖套

5、连接血氧饱和度探头，夹血氧探头至手指或脚趾

探头线应该置于手背 (指甲面朝向)或脚掌上

6、体温探头夹紧于病人腋下

7、调节报警参数：心率、血压、脉搏、呼吸、血氧

6、检测病人并记录



广州一古医疗设备维修有限公司

地址：广州市天河区棠德南路 64 号 123 大厦 702 室

www.yigu-medical.com

TEL/FAX:020-85614010

“质量第一

诚信服务

合法经营”

您的满意是我们的追求！