


Mindray 监护仪维修 迈瑞 PM-8000 监护仪维修 迈瑞监护仪维修配件

迈瑞 PM-8000Express 监护仪血压漏气维修

故障现象：按下测压键后泵启动，开始对袖带充气，袖带内的压力达到 175mmHg 停止充气，此时可听到排气阀正常工作声音，经约 5S 左右排气阀停止工作，屏显示“漏气”。更换血压袖带，故障依旧；手动复位血压模块后，但再一次出现同样的报“漏气”。做血压漏气检测，报“泵漏气”。

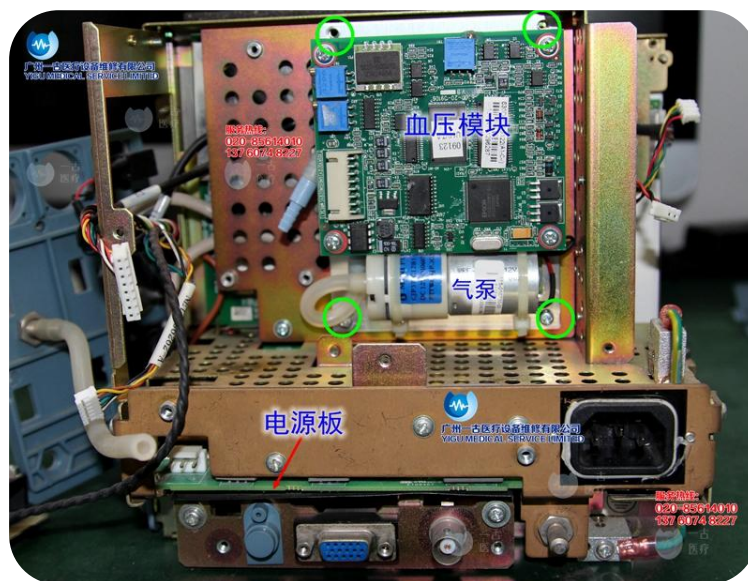

检修与分析：初步判断是血压模块故障，拆开机器，更换血压模块上的血压泵，装好机器，开机测试，各参数测试正常，最后再做血压漏气检测，没有出现“泵漏气”提示，所以故障排除！

迈瑞 PM-7000 PM-8000/8000Express PM-9000/9000Express 监护仪漏气检

测步骤！

1、 选中右侧“NIBP”点击进去，进入 NIBP 设置！



2、 然后选中“漏气检测”，点击进行漏气检测！



3、 注意事项：

- (1) 做漏气检测时，用袖带绑住圆柱形的材质僵硬的瓶子，不要用手臂检测！；
- (2) 做漏气检测时，要留心观察“袖带压”数值变化。正常的情况下（气路没有漏气）是“袖带压”数值是逐渐变小到一定数值才放气的。例如：从 175—174-（174）-173—。。。放气。出现提示“手动”；若气路有漏气会提示“泵漏气”。